



## 6. Хранение и транспортирование

6.1. Отсасыватель транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта. Условия транспортирования по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха 98%, при температуре плюс 35 °С.

6.2. Отсасыватель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150 при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности не выше 80 % при 25 °С.

## 7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие отсасывателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия потребителю.

7.3. Гарантии не распространяются на выход из строя светодиодов, лампочек и переключателей, бой стекла в процессе эксплуатации в период гарантийного срока.

7.4. Ремонт отсасывателя в течение гарантийного срока осуществляется организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности и договор с изготовителем на гарантийное обслуживание и ремонт (перечень организаций осуществляющих обслуживание и ремонт указан в п.11).

7.5. На отсасыватели, ремонт которых проводится специалистами, не имеющими допуск от изготовителя, гарантии изготовителя не распространяются.

7.6. В случае отказа или неисправности отсасывателя в период действия гарантийных обязательств, владелец должен направлять в адрес организации, осуществляющей ремонт или завод-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт с указанием своего адреса и контактного телефона;
- рекламационный акт с указанием замечаний и выявленных неисправностей.

7.7. При отправке отсасывателя в ремонт производителю, поставщик или заказчик должны предварительно согласовать условия и сроки отправки отсасывателя и его комплектность. При отправке на завод-изготовителя отсасыватель должен быть упакован в соответствии с разделом 5 настоящего документа, обеспечивающую целостность изделия и его составных частей.

## 8. Утилизация

8.1 Отсасыватель относится к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Утилизация должна проводиться в соответствии с законодательными актами по утилизации отходов потребления и правилами, принятыми в медицинском учреждении.

## 9. Сведения о рекламациях

9.1. В случае отказа или неисправности в период действия гарантийных обязательств, владелец должен направить в адрес завода-изготовителя или организации, осуществляющей ремонт, упакованный в соответствии с п.5 отсасыватель и следующие документы:

- заявку на ремонт с указанием своего адреса и контактного телефона;
- утвержденный акт о замеченных неисправностях.

9.2 Информацию о неблагоприятных событиях, побочных эффектах, связанных с применением отсасывателя, просим направлять в адрес изготовителя (п.11.1).

## 10. Свидетельства о приемке, поставке и продаже

### Свидетельство о приемке

Установка стоматологическая УС-01 «Селена-2000» - Отсасыватель стоматологический вакуумный настольный зав. № 613 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р 50267.0, технических условий ТУ 32.50.11-137-45814830-2017, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК



Иовенко В.В.  
расшифровка подписи

9.06.2018г  
число, месяц, год

### Свидетельство о поставке/продаже

Поставщик /продавец

наименование

обозначение документа по которому производится поставка

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

## 11. Сведения о производителе и организациях, осуществляющих техническое обслуживание

11.1. **Предприятие-изготовитель:** Акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (АО «ОЭЗ «ВладМиВа»), Россия, 308023, г. Белгород, ул. Студенческая 19, Тел. (4722) 200999, факс, (4722) 201-010

11.2. **Организация, осуществляющая техническое обслуживание и ремонт:**

ООО «ТД «ВладМиВа», Юр.адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 118

Тел. (4722) 200-555, факс, (4722) 31-59-03

Лицензия № ФС-99-04-002831 от 01.07.2015г.

адрес: г. Белгород, ул. Садовая, 118