

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Реклинатор ортопедический РО – «ТРИВЕС»

Модель: Т-1778

Описание:

- снабжен 4-мя пластиковыми ребрами жесткости и системой динамических лямок для восстановления и сохранения правильной осанки;
- мягкая спинка;
- незаметен под одеждой, удобен в повседневной жизни, не ограничивает привычный распорядок дня;
- цвет: черный, бежевый.

Функции:

- формирование и поддержание правильной осанки;
- фиксация и разгрузка грудного отдела позвоночника;
- нормализация мышечного тонуса.

Показания к применению:

- различные варианты нарушения осанки у детей и взрослых;
- кифотическая и сколиотическая деформации позвоночника I-II степени;
- миозиты, межреберные невралгии в грудном отделе позвоночника.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- сколиоз III-IV степени;
- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника;
- наличие в области применения реклинатора контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- изделие не рекомендуется носить на голое тело, его надевают поверх хлопчатобумажной футболки или майки;
- приложить изделие к спине;
- обернуть лямки вокруг надплечий и зафиксировать их контактной лентой;
- одернуть спинку изделия и зафиксировать пояс под грудью;
- степень фиксации определяется врачом;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.

Рекомендуется применять в комплексе с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтическим лечением.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования реклинатора появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать реклинатор;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Состав: полиамид – 40%, хлопок – 20%, пенополиуретан – 20%, эластан – 15%, полиэстер – 5%, ребра – пластик.

Размер изделия	2(XS)	3(S)	4(M)	5(L)	6(XL)
Окружность грудной клетки, см	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110