



ТРИВЕС

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для новорожденных ТВ - «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-000

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для детей грудничкового возраста ТВ - «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-001

Описание:

- изготовлены из пенополиуретана с чехлом из хлопка, снабжены контактной лентой (застежка «Велкро»);
- ТВ-000: для новорожденных, высота 3,5 см;
- ТВ-001: для детей грудничкового возраста, высота 5 см.

Функции:

- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных;
- в комплексном лечении мышечной кривошеи;
- ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков;
- патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок);
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок;
- зафиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади;
- режим и срок ношения определяются врачом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- ручная стирка при температуре не более 30°C;
- не использовать отбеливатели, растворители и химическую чистку;
- не отжимать, не гладить утюгом;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;

Состав: основа – пенополиуретан, чехол: хлопок – 100%.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.



ДИСТРОФИЯ № 28