


1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы.

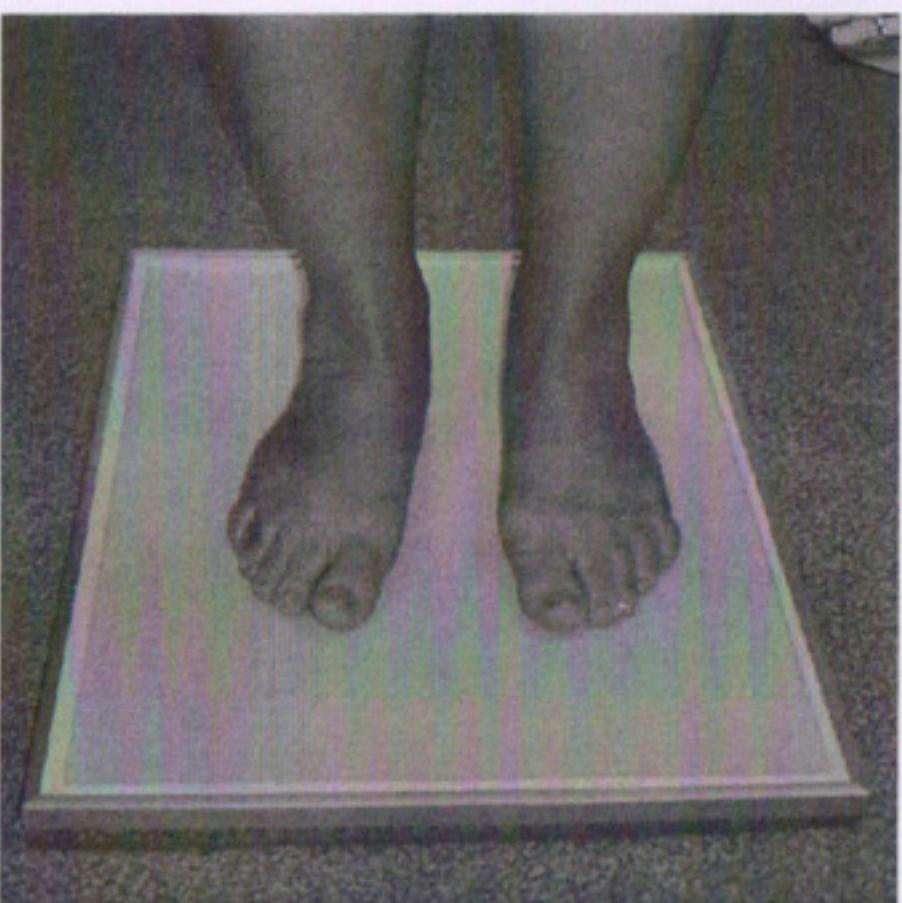

1.2 Плантограф выпускается в соответствии с ТУ 9425-160-01894927-2002.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Используемые материалы: ПВХ 8 мм ГОСТ 17622-72, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5949-75, алюминий анодированный плёнка полиэтиленфталоновая ТУ 2255-466-05761784-2002, трикотажная ткань с клеевым покрытием арт.376-160 (376-220) или ткань льняная ГОСТ 5665-77, соответствует ГОСТ Р ИСО 10993-99.

2.2 Габаритные размеры: 440 x 375 x 19,6 ± 0,5мм.

2.3 Масса плантографа - 2,1 ± 0,1 кг.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

- | | |
|--------------|-----------|
| - Плантограф | -1 шт. |
| - Ванночка | -1 шт. |
| - Валик | -1 шт. |
| - Паспорт | -1 экз. |
| - Этикетка | -1 шт. |
| - Бумага А3 | -50 лист. |

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Провести расконсервацию комплекта, его осмотр и проверку комплектности согласно п.3.

4.2 Между рамкой и тканью для каждого больного должен вкладываться чистый лист бумаги (лучше - белой) размерами 40x30 см.

4.3 При помощи валика (или губки) на полотно должен быть нанесен с типографской или штемпельной краски.

4.4 Перед каждым использованием плантографа и в процессе дальнейшей эксплуатации поверхность плёнки плантографа должна быть подвергнута дезинфекции методом двукратной протирки салфеткой, смоченной трёхпроцентным раствором перекиси водорода (при температуре не менее +18С) и с интервалом между протирками - 15 минут по ОСТ 42-21-2-85.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Плантограф устанавливается около больного. Больной усаживается и ставит свои стопы на плёнку по оси плантографа. После этого больной разрешают медленно подняться (не сходя с места) с равномерным упором на обе стопы. В таком положении производится обвод стопы карандашом. Больной опять медленно усаживается и убирает ноги с плёнки. Затем открывают рамку плантографа и извлекают лист бумаги с отпечатком стопы.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Плантограф соответствует требованиям технической документации и признан годным для эксплуатации.



Штамп ОТК

Подпись _____

Дата " ____ " 20__ г.