

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж фиксирующий на плечевой сустав БФПС - «ТРИВЕС»

Модель: Т-8101(повязка Дезо)

Бандаж фиксирующий, поддерживающий для руки после травм БПРТ - «ТРИВЕС»

Модель: Т-8102 (косынка)

Описание:

- модель Т-8101 изготовлена из трехслойного воздухопроницаемого трикотажного материала, обеспечивающего максимальный комфорт при использовании, состоит из муфты для оптимального размещения верхней конечности в функционально выгодном положении и съемного пояса для надежной фиксации верхней конечности к туловищу;
- модель Т-8102 изготовлена из прочного, износостойкого, моющегося материала, положение конечности регулируется ремнем на надплечье;
- бандажи универсальные, подходят для левой и правой руки;
- не вызывают аллергических реакций и раздражения кожи.

Функции:

- фиксация верхней конечности в физиологически правильном положении;
- разгрузка мышечно-связочного аппарата и суставов верхней конечности.

Показания к применению:

- реабилитация после травм, гипсовой иммобилизации и оперативных вмешательств на плечевом суставе и верхней конечности;
- острые и хронические заболевания области плечевого сустава и верхней конечности (артриты, артрозы, плекситы, тендиниты, субакромиальный синдром, миозиты и др.)

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.


Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению Т-8101:

- предплечье расположить в муфте, как показано на рисунке;
- ремни перекидываются через надплечья, перекрещиваются на спине и закрепляются на муфте;
- пояс фиксирует пораженную конечность к туловищу;
- степень фиксации определяется лечащим врачом.

Инструкция по применению Т-8102:

- предплечье располагается в муфте;
- угол сгибания предплечья в локтевом суставе определяется лечащим врачом.

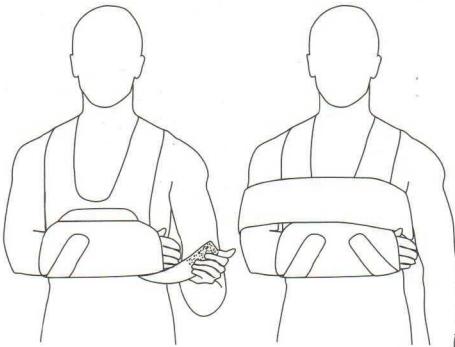

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Состав:

T-8101: пенополиуретан - 60%, нейлон - 20%, полиэстер - 20%;

T-8102: полиэфир - 100%.

T-8101

| <i>Размер изделия</i> | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4(XL) |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| <i>Длина предплечья, см</i> | 28-33 | 33-38 | 38-43 | от 43 |

T-8102

| <i>Размер изделия</i> | 1 (S) | 2 (M) | 3 (L) | 4 (XL) |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|
| <i>Размер одежды</i> | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |