

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Подушка ортопедическая под голову ТОП - «ТРИВЕС»

Модели: ТОП – 119 (M), ТОП – 119 (L)

Описание:

- эргономическая форма подушки обеспечивает полноценный воздухообмен и физиологически правильное распределение давления на шейный отдел позвоночника во время сна;
- новый материал Soft Touch, обладающий повышенной мягкостью и комфортностью, состоит из множества ячеек открытой формы. При использовании подушки ячейки сжимаются, и материал принимает форму Вашего тела, не оказывая на него ответного давления;
- конструкция подушки специально разработана для максимальной разгрузки мышц шеи, плечевого пояса и спины;
- анатомическая форма валика позволяет спать на спине и на боку с наилучшей поддержкой шеи и головы;
- размер M - подшейный валик высотой 12,5 см оптimalен для людей с длиной надплечья от 11 см;
- размер L - подшейный валик высотой 14 см оптimalен для людей с длиной надплечья от 13 см;
- чехол выполнен из хлопка, что придает дополнительную мягкость изделию;
- в комплекте одна съемная **наволочка из материала ThermoCool**:

ThermoCool – инновационный материал, обеспечивающий максимальный комфорт в любое время года благодаря функции двойного терморегулирования. Уникальная двойная система волокон позволяет обеспечивать необходимую для организма терморегуляцию: поддерживает тепло в холодное время года, а в жаркое – обеспечивает оптимальный воздухообмен. Температурный баланс помогает улучшить сон и сделать его наиболее комфортным.

Функции:

- обеспечение физиологически правильного положения головы и шеи во время сна;
- разгрузка мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса;
- нормализация мышечного тонуса, устранение усталости;
- улучшение кровоснабжения головы и шеи;
- обеспечение свободного дыхания во время сна.

Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника;
- миозит мышц шеи;
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника;
- нестабильность шейного отдела позвоночника;
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника;
- рекомендована для полноценного восстановления организма во время сна и отдыха.

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Рекомендации по уходу:

- основа в чехле: сухая чистка;
- не использовать химический метод чистки;
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40°C мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить;
- не подвергать воздействию прямого солнечного света;
- держать вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделие давящие и колющие-режущие предметы.

Состав:

- основа: вязкоэластичный пенополиуретан;
- чехол: хлопок - 100%;
- съемная наволочка из материала ThermoCool: полиэстер – 67,8%, ThermoCool – 32,2%.

Размер подушки:

ТОП-119 (М): 50x32x12,5/8 см

ТОП-119 (L): 50x32x14/9 см

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Приспособления ортопедические специальной формы
для расслабления мышц и разгрузки позвоночника ТОП-«ТРИВЕС»
по ТУ 9396-002-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Подушка ортопедическая под голову ТОП-«ТРИВЕС» (вид 181450).
РУ № ФСР 2008/03750 от 30.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.



				Упаковка № 17
Дата выпуска	-	Ноя 2017		
Штамп ОТК			OTK	