



Сменные воронки (трех типоразмеров: большая, средняя и малая) представляют собой детали из полимерного материала, которые устанавливаются на опорной площадке рабочего окончания аппликатора и предназначены для отграничения небной миндалины при её обработке через промежуточный раствор антисептика. Выбор типоразмера воронки определяется размерами миндалины.

Сменные воронки устойчивы к средствам дезинфекции и стерилизации химическими методами.

Дезинфекция сменных воронок производится с использованием дезинфектантов способом погружения в раствор в специальных емкостях или контейнерах с решетками. Для дезинфекции используются препараты отечественного и импортного производства: гигасепт ФФ 10,0% - экспозиция 60 мин; лизоформин 3000 - 0,75% - экспозиция 60 мин; дюльбак ДТБ-Л 2,0% - экспозиция 15 мин; **велтолен 2,5% - экспозиция 60 мин**; перекись водорода 4,0% - экспозиция 90 мин; ДП-2 0,5% - экспозиция 60 мин и другие препараты в соответствии с методическими указаниями № 287-113 от 30 декабря 1998 г.

После окончания дезинфекционной выдержки сменные воронки промывают проточной питьевой водой и подвергают предстерилизационной очистке. Для предстерилизационной очистки используются следующие средства: дюльбак ДТБ-Л 2,0% (ручной способ), септодор-форте 0,4% (ручной способ), дезфект 3,8% (ручной способ).

При наличии у дезинфицирующего средства, помимо моющих также и антимикробных свойств, предстерилизационная очистка на этапе замачивания может быть совмещена с дезинфекцией.

После сушки обработанных сменных воронок и контроля качества предстерилизационной очистки их подвергают стерилизации. Стерилизацию осуществляют путем полного погружения в раствор стериллянта:

- **перекись водорода 6,0% - 360 мин,**
- сайдекс (готовый раствор) - 240 мин,
- лизоформин 8,0% - 60 мин,
- гигасепт ФФ 10,0% - 600 мин.

Промывные воды после ополаскивания обеззараживаются 0,2% раствором люмаксола или другим разрешенным средством и утилизируются.