



ISO 9001: 2008

ВОЗДУХОВОДЫ

ТО 38 105 184 - 2005

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

Воздуховоды предназначены для свободного прохождения воздуха во время искусственного дыхания с помощью аппарата или без него.

2. Основные типы и размеры

Воздуховоды выпускаются следующих типов и размеров:

ротовые №№ 00, 0, 1, 2, 3;

носовые №№ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

рот в рот №№ 1, 2, 3.

3. Комплектность

В комплект поставки воздуховодов должны входить:

воздуховод - 1 шт.;

этикетка - 1 шт.

4. Дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация

Воздуховоды дезинфицируют кипячением в дистиллированной воде в течение (30±5) мин, затем проводят предстерилизационную очистку в моющем растворе, содержащем: перекись водорода - 17 см³, моющее средство типа "Астра" - 5 г, питьевую воду 978 см³ при температуре (50±5)°С в течение (15±1) мин., затем стерилизуют в 6 % растворе перекиси водорода в закрытой емкости при полном погружении изделия в раствор и выдержке в нем в течение (360±5) мин при температуре не менее 18°С.

После указанной обработки воздуховоды не должны деформироваться и на их поверхности не должно появляться трещин, видимых невооруженным глазом.

5. Хранение

Воздуховоды в процессе хранения не должны подвергаться действию прямых солнечных лучей, бактерицидных ламп, кислот, щелочей, масел, а так же других веществ разрушающих резину.

6. Гарантии поставщика

Изготовитель гарантирует соответствие воздуховодов требованиям технического описания, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок годности - 4 года со дня изготовления.

7. Порядок предъявления рекламаций

Рекламации в установленном порядке предъявляются предпрятию-изготовителю с приложением инструкции по эксплуатации по адресу: