

ЧУДО-ВАРЕЖКА

массажер медицинский (модель 1)

для тела



«ЧУДО-ВАРЕЖКА»


массажер медицинский для тела

Кожный покров находится в непосредственном соприкосновении с внешней средой и активно участвует в жизнедеятельности организма. Кожа – огромное рецепторное поле, в котором содержатся нервные волокна и их окончания, сосуды, потовые и сальные железы. Правильный уход за кожей позволит избежать многих заболеваний. Для Вашего удобства был разработан массажер медицинский для «Чудо-варежка».

«ЧУДО-ВАРЕЖКА»

денеге арналған медициналық массажер

Тері қабаты сыртқы ортамен тікелей жанасады және ағзаның тіршілік әрекетіне белсенді түрде қатысады. Тері – үлкен рецепторлық өріс. Онда жүйке талшықтары және олардың сондар, қан тамырлар, тер және май бездері бар. Теріні дұрыс күту көп ауруларды болдырмауға көмектеседі. Сізге ыңғайлы болуы үшін денеге арналған «Чудо-варежка» медициналық массажері жасалды.

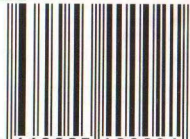

4 660003 400021

RUS

Массажер медицинский для тела «ЧУДО-ВАРЕЖКА» (модель 1)

инструкция по применению

Область применения: Общий массаж и самомассаж всех участков тела.

Способ применения: надеть на руку и круговыми движениями делать массаж с применением геля для душа либо крема/масла для массажа.

Состав: ПВХ пластикат. Размер: 115*100*38 мм. Вес 106 грамм.

Массажер медицинский для тела «Чудо-варежка» имеет две разных по назначению поверхности:

1. Мягкими массирующими движениями Вы воздействуете на структурные слои, что благотворно влияет на центральную нервную систему через многочисленные экстер- и интерорецепторы. При массаже удаляются с кожи отжившие клетки, что значительно улучшает кожное дыхание и усиливает выведение продуктов распада. Повышается тонус кожи, она становится гладкой, упругой, розовой и чистой.

2. Применяется для антицеллюлитного массажа. При массаже массажером «Чудо-варежка» кожные сосуды расширяются, улучшается кровообращение, активизируется питание кожи и деятельность заложённых в ней желез. Ежедневное применение массажера «Чудо-варежка» позволяет успешно бороться с целлюлитом. Противопоказанием к применению является наличие гнойных и открытых ран.

KZ

Денеге арналған медициналық массажер «ЧУДО-ВАРЕЖКА» (модель 1)

пайдалану бойынша нұсқаулық

Денеге арналған «Чудо-варежка» медициналық массажерінің мақсаты әр түрлі екі беті бар:

1. Жұмсақ сылаушы қозғалыстармен құрылымдық қабаттарға әсер етеді. Бұл көптеген экстер- және интерорецепторлар арқылы орталық жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Массаж жасағанда теріден ескі жасушалар тазаанады. Бұл терінің дем алуын айтарлықтай жақсартады және ыдырау өнімдерін шығаруды күшейтеді. Терінің тонусы артады, ол жұмсақ, қызғылт және таза болады.

2. Антицеллюлиттік массаж үшін қолданылады. «Чудо-варежка» массажерінің көмегімен массаж жасағанда терінің қан тамырлары кеңееді, қан айналым жақсарады, терінің қоректенуі және ондағы бездердің әрекеті белсендіріледі. «Чудо-варежка» массажерін душта және ваннада сабын және гельмен бірге пайдалануға болады. «Чудо-варежка» массажерін күнделікті пайдалану целлюлитпен сәтті күресуге мүмкіндік береді. Пайдалануға қарсы көрсетілім – іріңді және ашық жаралардың болуы.