

- с наполнителем из пенополиуретана эластичного (п. 4.1а), односекционный (табл. 1 графы А, В), длиной 2000 мм (таб.1 графы С, D), шириной 800 мм (таб.1графы Е, F), высотой 100 мм (таб.1 графы G, H), с чехлом из кожзаменителя ПВХ (таб.1 графы I, J) .

8. Свидетельство о приёмке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ 9396-001-09922741-2014, сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н10860) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска.

Штамп ОТК

9. Свидетельство об упаковке

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом упакован на предприятии Изготовителя согласно требованиям ТУ 9396-001-09922741-2014 .

должность

подпись

расшифровка
подписи

Число, месяц, год.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода.

8.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭсДжиМедикал»

код ОКПД-2

31.03.12.120

Код ТН ВЭД

94042910

МАТРАЦ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРУЖИННЫЙ С ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ЧЕХЛОМ

ТУ 9396-001-09922741-2014

ПАСПОРТ

2016 г

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

1. Основные сведения об изделии

1.1 Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготавливается в соответствии с ТУ 9396-001-09922741-2014.

1.2 Изделие имеет РУ № РЗН 2016/5212 от 09.08.2018 г и Сертификат соответствия № РОСС RU.НА34.Н10860 с 22.08.2018 г.

1.3 В целях повышения надежности и долговечности изделия, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

2. Назначение изделия

Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом (далее Изделие), предназначен для настила на медицинские кровати поверх сетки, а также для функциональных кроватей, предназначенных для ухода за больными, для реабилитации, восстановления организма, для создания удобной поверхности, на которой можно длительное время отдыхать, лежать, спать.

Матрацы используются в лечебных, реабилитационных, профилактических медицинских учреждениях, а также в домашних условиях.

3. Технические характеристики

1. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом состоит из:

- внутреннего мягкого объемного элемента:

а) пенополиуретан эластичный (НПВ);

б) пенополиуретан вторичного вспенивания (НПВВ);

с одной или двух сторон которого могут быть нанесены поперечные и продольные насечки (штрибированный).

- водонепроницаемого чехла.

4. Комплектность

5.1 Матрац – 1 шт.;

5.2. Паспорт – 1 шт.;

5.3. Упаковка – 1 шт.;

5. Хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация

6.1 Транспортировка изделия осуществляется в упаковке в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, воздушном или водном) в порядке, установленном по условиям 2 ГОСТ15150-69, с учётом следующих требований: температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50° до +50°С.

6.2. Изделие должно храниться только в упаковке, в помещениях по условиям 2

ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды в диапазоне от -50° до +50°С).

6.3 Изделие, согласно ГОСТ 50444-92, пригодно к эксплуатации при температуре окружающей среды от +40° до - 25° С и номинальной относительной влажности воздуха от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С).

6.3 Утилизацию изделия проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790.

6.4 Изделие упаковано в индивидуальную полиэтиленовую плёнку (пакет).

6.5. Допускается влажная чистка мягкой салфеткой или щёткой, смоченной в нейтральных мыльных растворах. Не допускается применение абразивных и хлорсодержащих материалов. Чехол матраца допускает стирку с применением бытовых моющих средств.

6.6. Чехол матраца обладает устойчивостью к воздействию агрессивной биологической жидкости (пота, мочи) в соответствии с МУ 25.1-001.

6.7 Химическая чистка и стирка чехлов по ГОСТ 25652-83.

6.8. Дезинфекция матраца производится по МУ-287-113 любыми дезинфицирующими и моющими средствами методом орошения или протирания, а также обработкой в дез. камере при температуре не более 90 град.С.

6. Маркировка и размеры изделия

Таблица 1

Количество секций		Длина мм		Ширина мм		Высота мм		Материал чехла	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	односекционный	1	1900	1	600	1	80	1	Кожзаменитель ПВХ
2	двухсекционный	2	2000	2	700	2	100	2	Синтетическая ткань с полиуретановой мембраной
3	трёхсекционный	3	1600	3	800	3	60	3	Синтетический трикотаж с полиуретановой мембраной
4	четырёхсекционный	4	1700	4	900	4	120		
5	двухсекционный штрибированный	5	1800	5	850	5	140		
6	трёхсекционный штрибированный	6	1850	6	950	6	150		
7	четырёхсекционный штрибированный	7	1950	7	1000	7	200		
8	универсальный штрибированный	8	1200	8	1200				

Пример условного обозначения матраца: Матрац беспружинный с водонепроницаемым чехлом.