

## **6. Гарантийные обязательства.**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

## **7. Свидетельство о приемке.**

Стол пеленальный СП.04.00

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер

---

Дата выпуска изделия:

---

Упаковщик:

---

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Наименование	Арт.
Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440)	СП.04.00



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

## **6. Гарантийные обязательства.**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня отгрузки их предприятием-изготовителем, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при нарушении правил эксплуатации и хранения;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине потребителя.

## **7. Свидетельство о приемке.**

Стол пеленальный СП.04.00

Соответствует ТУ 9452-003-68690950-2014

Серийный номер

\_\_\_\_\_

Дата выпуска изделия:

\_\_\_\_\_

Упаковщик:

\_\_\_\_\_

ООО Медицинская Компания



## Паспорт

Наименование	Арт.
Стол пеленальный (смотровой) (вид 303440)	СП.04.00



ТУ 9452-003-68690950-2014

г. Нижний Новгород

## 1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для пеленания детей.

1.2. Ложе изготовлено из пластика. Каркас выполнен из труб  $\varnothing 32$  мм и  $\varnothing 20$  мм, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Предусмотрена полка для пеленок.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
Ширина	Глубина	Высота	
600	700	950	15

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Пластиковая столешница	1
3.2	Боковина	2
3.3	Стяжка боковины	2
3.4	Полка (610x600)	1
3.5	Болт мебельный М10x35	4
3.6	Шайба Т10	4
3.7	Пистон пластиковый	4
3.8	Саморез 4.2x30	4
3.9	Матрац	1
3.10	Паспорт	1
3.11	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестообразная отвертка и ключ на 10 мм.

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Соединить боковины 3.2 с помощью стяжек 3.3 закрепив их болтами 3.5 с шайбами 3.6.

4.3. Установить пластиковую столешницу 3.1 на каркас, закрепить ее через отверстия пистонами 3.7.

4.4. Положить полку 3.4 на поперечины боковин 3.2, закрепить ее через отверстия в поперечинах саморезами 3.8.

## **5. Условия хранения и эксплуатации.**

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.

## 1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для пеленания детей.

1.2. Ложе изготовлено из пластика. Каркас выполнен из труб  $\varnothing 32$  мм и  $\varnothing 20$  мм, окрашенных методом порошковой полимерной окраски. Предусмотрена полка для пеленок.

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
Ширина	Глубина	Высота	
600	700	950	15

## 3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
3.1	Пластиковая столешница	1
3.2	Боковина	2
3.3	Стяжка боковины	2
3.4	Полка (610x600)	1
3.5	Болт мебельный М10х35	4
3.6	Шайба Т10	4
3.7	Пистон пластиковый	4
3.8	Саморез 4.2x30	4
3.9	Матрац	1
3.10	Паспорт	1
3.11	Упаковка	1

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестообразная отвертка и ключ на 10 мм.

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Соединить боковины 3.2 с помощью стяжек 3.3 закрепив их болтами 3.5 с шайбами 3.6.

4.3. Установить пластиковую столешницу 3.1 на каркас, закрепить ее через отверстия пистонами 3.7.

4.4. Положить полку 3.4 на поперечины боковин 3.2, закрепить ее через отверстия в поперечинах саморезами 3.8.

## **5. Условия хранения и эксплуатации.**

5.1. Транспортирование оборудования должно производиться в крытых транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Размещение и крепление упаковок с изделиями оборудования в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

5.3. Условия транспортирования оборудования крытыми транспортными средствами вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.4. Оборудование должно храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном положении.

5.5. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

5.6. Хранение оборудования в одном помещении с веществами, вызывающими разрушение защитно-декоративных покрытий, не допускается.

5.7. Оборудование предназначено для эксплуатации внутри помещений в условиях медицинских учреждений.