

**Уважаемый покупатель!**

**Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».**

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## **Бандаж компрессионный на лучезапястный сустав БКЛЗС – «ТРИВЕС»**

**Модель: Т-8302**

**Описание:**

- изготовлен из трикотажного материала, с высоким содержанием хлопка;
- хорошо отводит влагу с поверхности кожи;
- универсальный: для левой и правой руки.

**Модель: Т-8303**

**Описание:**

- изготовлен из неопрена, внутренний слой, прилегающий к коже, – Coolmax – современный, воздухопроницаемый материал, поддерживающий оптимальный температурный баланс кожи;
- хорошо отводит влагу с поверхности кожи;
- универсальный: для левой и правой руки.

**Функции:**

- легкая фиксация и компрессия лучезапястного сустава;
- термосберегающий и массажный эффекты (в модели Т-8303).

**Показания к применению:**

- частичные повреждения связок и ушибы лучезапястного сустава;
- профилактика травм лучезапястного сустава при занятиях спортом и интенсивных физических нагрузках;
- в комплексном лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний лучезапястного сустава.

**Противопоказания к применению:**

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

**Инструкция по применению (в модели Т-8302):**

- наденьте петлю на первый палец кисти;
- оберните бандаж по тыльной стороне ладони и зафиксируйте на лучезапястном суставе с помощью застежки «Велкро»;
- степень фиксации и длительность ношения бандажа определяется врачом.

**Инструкция по применению (в модели Т-8303):**

- оберните бандаж вокруг запястья;
- зафиксируйте бандаж с помощью застежки «Велкро»;
- степень фиксации и длительность ношения бандажа определяются врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все застёжки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:****T-8302:** хлопок – 90%, эластан – 10%;**T-8303:** неопрен – 50%, нейлон – 30%, Coolmax – 20%.

Размер изделия

универсальный