

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Бандаж послеоперационный БПО - «ТРИВЕС»

### Модели: Т-1331, Т-1332, Т-1333

#### Описание:

- модель Т-1331: высота бандажа 20 см, бандаж оптимален для людей невысокого роста при расположении послеоперационного шва ниже пупка;
- модель Т-1332: высота бандажа 25 см, бандаж оптимален для людей среднего роста при расположении послеоперационного шва ниже или на уровне пупка;
- модель Т-1333: высота бандажа 30 см, бандаж оптимален для людей высокого роста при расположении послеоперационного шва выше пупка;
- основа выполнена из воздухопроницаемого, гипоаллергенного, эластичного материала;
- передняя панель, прилегающая к послеоперационному шву, плотная и нерастяжимая для правильного формирования послеоперационного рубца и быстрого заживления послеоперационной раны;
- все модели снабжены двумя разгружающими пластинами, предотвращающими скручивание бандажа.

### Модель: Т-1334

#### Описание:

- высота бандажа 23 см, оптимальна при расположении послеоперационного шва ниже пупка;
- бандаж выполнен из трехпанельного эластичного полотна, надежно фиксирующего переднюю и боковые брюшные стенки и область поясицы;
- передняя панель, прилегающая к послеоперационному шву, плотная и нерастяжимая для правильного формирования послеоперационного рубца и быстрого заживления послеоперационной раны;
- двухлепестковая застежка «Велкро» позволяет правильно расположить бандаж на любой фигуре.

#### Функции:

- фиксация брюшной стенки, поясничных областей;
- уменьшение боли в области послеоперационной раны, рубца или в области травмы;
- оптимальные условия для заживления послеоперационной раны и формирования послеоперационных рубцов;
- профилактика развития послеоперационных грыж;
- улучшение тонуса мышц брюшной стенки.

#### Показания к применению:

- после операций на брюшной полости и брюшной стенке, области почек, а также после Кесарева сечения;
- слабость брюшной стенки и расхождения мышц живота;
- тупые и острые травмы брюшной стенки, поясничных областей;
- профилактика перенапряжения мышц при физической нагрузке в послеоперационном периоде;
- модель Т-1334 оптимальна в эстетической хирургии, после липосакции.

### **Противопоказания к применению:**

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- синдром портальной гипертензии;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

### **Инструкция по применению:**

- надеть бандаж на нижнее белье или непосредственно на тело, лежа на спине, под контролем врача;
- зафиксировать застежку бандажа в зависимости от места расположения послеоперационного шва;
- использовать эластичность бандажа для достижения максимального эффекта;
- степень фиксации и длительность ношения определяются лечащим врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

### **Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

### **Состав:**

**T-1331, T-1332, T-1333:** полиамид - 40%, полиэстер - 25%, пенополиуретан - 20%, эластан - 15%, ребра - пластик;

**T-1334:** полиамид - 54%, хлопок - 20%, эластан - 16%, полиэстер - 10%.

<b>Размер изделия</b>	<b>2 (XS)</b>	<b>3 (S)</b>	<b>4 (M)</b>	<b>5 (L)</b>	<b>6 (XL)</b>	<b>7 (XXL)</b>
<b>Окружность талии, см</b>	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140