

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения.

Бандажи грыжевые вентральные БГв- «ТРИВЕС»

Модели: Т-1441 - высота бандажа 15 см

Т-1442 - высота бандажа 20 см

Описание:

Модель Т-1441 – высота бандажа 15 см, оптимален для лечения и профилактики пупочных грыж, грыж белой линии живота и небольших послеоперационных грыж.

Модель Т-1442 – высота бандажа 20 см, оптимален для лечения и профилактики послеоперационных грыжевых выпячиваний.

Изготовлены из эластичного, воздухопроницаемого, гипоаллергенного материала.

В конструкции бандажей предусмотрены две разгружающие пластины на поясничной области, дополнительная стяжка и съемный аппликатор для надежной фиксации грыжевого выпячивания.

Принцип действия:

- фиксация передней и боковой брюшной стенки, поясничных областей;
- профилактика развития послеоперационных грыж;
- обеспечивает локальное давление на область грыжи;
- восстанавливает тонус мышц брюшной стенки.

Показания к применению:

- вправимые пупочные и околопупочные грыжи, грыжи белой линии живота;
- вправимые послеоперационные грыжи;
- расхождение мышц живота;
- травмы передней брюшной стенки;
- профилактика перенапряжения мышц при тяжелой физической нагрузке;
- после операций на брюшной стенке и области почек с целью профилактики рецидива грыжи и уменьшения боли в области рубца.

Инструкция по применению:

- бандаж одевается лежа на спине, после вправления грыжевого выпячивания;
- аппликатор устанавливается на зону грыжи;
- обернуть бандаж вокруг тела и зафиксировать спереди с помощью застежки Велкро;
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом;
- применять изделия под контролем врача.

Бандаж грыжевой паховый БГп- «ТРИВЕС»

Модель: Т-1443

Описание:

Состоит из широкого пояса с регулируемыми подбедренными лямками, имеет 2 съемных пелота, полностью закрывающих отверстия пахового и бедренного каналов.

Снабжен прочной, износостойкой застежкой Велкро.

Универсальный, может использоваться при одно- или двухсторонних грыжах.

Прост в применении, незаметен под одеждой, не сковывает движения.

Принцип действия:

- обеспечивает умеренное регулируемое давление на области выхода пахового и бедренного каналов.

Показания к применению:

- профилактика увеличения размеров и ущемления вправимых паховых и бедренных грыж;
- профилактика развития одно или двухсторонних грыж при физической нагрузке, натуживании и кашле;
- профилактика рецидивов грыж в послеоперационном периоде.

Инструкция по применению:

- бандаж одевается лежа на спине, после вправления грыжевого выпячивания;
- пелоты устанавливаются в карманы бандажа с одной или двух сторон, в зависимости от расположения грыжи;
- широкий пояс фиксируется на бедрах с помощью застёжки Велкро;
- лямки бандажа пропускают между ног и закрепляют сзади на поясе. Для снятия бандажа достаточно расстегнуть пояс;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.

При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застёжки;
- снять аппликаторы и вынуть пелоты из карманов;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не тереть и не выжимать изделие;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если в период использования бандажа появилась боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите бандаж и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Применять изделия под контролем врача.

Состав:

- T-1441: полиамид-40%, полиэстер-25%, пенополиуретан-20%, эластан-15%, ребра-пластик;
- T-1442: полиамид-40%, полиэстер-25%, пенополиуретан-20%, эластан-15%, ребра-пластик;
- T-1443: полиамид-35%, полиэстер-25%, пенополиуретан-15%, эластан-25%.