

## Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

## Корсет ортопедический КО – «ТРИВЕС»

### Модель: Т-1561

#### Описание:

- высота корсета 25 см;
- воздухо- и влагопроницаемая эластичная ткань с содержанием хлопка 53 % обладает выраженным компрессионным воздействием;
- анатомическая форма полностью адаптирует корсет к строению тела и обеспечивает максимальный комфорт в положении стоя и сидя;
- легкий, незаметный под одеждой, оптимален для длительного применения при постоянной активности в течение дня;
- усилен 4-мя металлическими ребрами жесткости с возможностью индивидуального профилирования для анатомически правильной поддержки поясничной области;
- 2 пластиковых ребра по передней поверхности поддерживают абдоминальную область и препятствуют скручиванию корсета;
- дополнительная двойная стяжка позволяет оптимально расположить корсет, улучшить прилегание изделия и индивидуально отрегулировать его фиксирующие возможности.

#### Функции:

- эффективная компрессия пояснично-крестцового отдела позвоночника;
- полужесткая фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника в функционально выгодном положении;
- активное воздействие на проприорецепторы;
- разгрузка межпозвонковых дисков, уменьшение явления воспаления и стимуляция восстановительных процессов в суставах поясничного отдела позвоночника;
- нормализация тонуса и разгрузка мышц спины;
- усиление кровообращения и улучшение метаболизма в поясничной области.

#### Показания к применению:

- острые, подострые и хронические боли в поясничной области, радикулиты и миозиты;
- реабилитация после травм и операций в поясничной области;
- консервативная терапия при остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, спондилезе, остеоартрозе в пояснично-крестцовом отделе позвоночника;
- слабость мышц спины (гипотрофия, атрофия);
- профилактика заболеваний позвоночника при физических и спортивных нагрузках.

#### Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- осложненные травмы позвоночника с повреждением спинного мозга;
- необходимость индивидуального ортезирования позвоночника;
- наличие в области применения корсета контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие.

**Применять изделие по назначению и под контролем врача.**

**Инструкция по применению:**

- надеть корсет на нижнее белье лежа на спине;
- ребра жесткости должны располагаться посередине поясничного отдела позвоночника на одинаковом расстоянии от позвоночного столба;
- зафиксировать застежку корсета на животе;
- отрегулировать степень фиксации с помощью дополнительной стяжки;
- длительность ежедневного использования определяется лечащим врачом.

**При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Если в период использования корсета появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.**

**Рекомендации по уходу:**

- перед стиркой застегните все застежки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30°C, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать корсет;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

**Состав:** хлопок – 53%, полиэстер – 31%, эластан – 16%, ребра – сталь, пластик.

<b>Размер изделия</b>	<b>2 (XS)</b>	<b>3 (S)</b>	<b>4 (M)</b>	<b>5 (L)</b>	<b>6 (XL)</b>	<b>7 (XXL)</b>
<b>Окружность талии, см</b>	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140