

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж компрессионный на коленный сустав БККС – «ТРИВЕС»

Модель: Т-8512

Описание:

- изготовлен из неопрена, внутренний слой, прилегающий к коже, – Coolmax – современный воздухопроницаемый материал, обладающий выраженными влагоотводящими свойствами;
- поддерживает оптимальный температурный баланс кожи;
- снабжен дополнительным кольцом для фиксации надколенника;
- 4 боковых пружинных ребра стабилизируют сустав во фронтальной плоскости;
- застежка на бедре обеспечивает оптимальное прилегание изделия к телу при увеличенной окружности нижней трети бедра;
- усилен дополнительными лентами для надежной фиксации бандажа.

Функции:

- средняя фиксация коленного сустава и надколенника;
- обеспечение термосберегающего и массажного эффектов.

Показания к применению:

- ушибы, частичные повреждения связок коленного сустава;
- в комплексной терапии артрозов, артритов, бурситов, синовитов и отеков коленного сустава;
- профилактика травм и заболеваний коленного сустава при физических нагрузках и занятиях спортом;
- ощущения нестабильности в коленном суставе.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- необходимость индивидуального ортезирования сустава;
- злокачественные новообразования в области использования бандажа;
- наличие в области применения бандажа контактных дерматитов, трофических язв и пролежней;
- аллергическая реакция на материалы, из которых изготовлено изделие;
- тромбоз вен в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:

- одевается непосредственно на тело;
- натяните бандаж на ногу до тех пор, пока надколенник не окажется в отверстии;
- застегните застежку на бедре;
- ребра должны располагаться по боковым поверхностям сустава;
- степень фиксации регулируется дополнительными лентами;
- длительность ежедневного использования и степень фиксации определяются врачом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- перед стиркой застегните все застёжки;
- рекомендована ручная стирка при температуре 30° С, отдельно от других вещей, с использованием моющего средства для деликатных тканей;
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- после стирки тщательно прополоскать бандаж;
- не тереть и не выжимать изделие;
- сушить в расправленном состоянии вдали от нагревательных приборов и прямого солнечного света;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Состав: неопрен – 50%, нейлон – 30%, материал Coolmax – 20%, пружинные ребра – сталь.

Размер изделия	1(S)	2(M)	3(L)	4(XL)	5(XXL)
Окружность коленного сустава, см	33-38	38-43	43-48	48-53	53-58